



MastiPro

Nova generacija automatskog uređaja
za detekciju mastitisa



Automatska kontrola mastitisa pri svakoj muži

Mastitis je uobičajena bolest na savremenim farmama muznih krava, koja izaziva zapaljenje mlečne žlezde. Ova bolest smanjuje kvalitet i prinos mleka, a ponekad čak dovodi do gubitka grla i isključenje iz dalje proizvodnje! Da biste kontrolisali mastitis, trebali bismo redovno da primenjujemo CMT Test. CMT iziskuje dodatno angažovanje i vreme na farmi. MastiPro radi automatski pri svakoj muži i šalje obaveštenje u ranoj fazi, TO JEST U SUBKLINIČKOJ fazi što je najznačajnije; na vaš mobilni telefon u slučaju sumnjivih slučajeva. Ovum putem možete dijagnostikovati mastitis i brzo preuzeti sve neophodne mere. Uz MastiPro, kvalitet vašeg mleka i prinos se povećavaju iz dana u dan, dok se troškovi lečenja smanjuju.



**Da li znate da su ukupni troškovi koje
dovodi upala vimena, naročito
subklinički oblik skoro 450 eura?**

MI IMAMO REŠENJE !

O MastiPro...

MastiPro je uređaj za otkrivanje mastitisa i subkliničkog mastitisa koji meri električnu provodljivost mleka računajući temperaturni efekat zahvaljujući svojoj pametnoj tehnologiji. MastiPro je On-line uređaj. Ne zahteva nikakve uzorke za razliku od drugih uređaja. Kada muža počne automatski se aktivira i kreće sa merenjem, te kontinuirano meri tokom muže. Zbog toga se analizira svo mleko pomužene životinje. Pored toga sistem ne zahteva hemijska rešenja potrebna za detekciju.

Pošto je vodoootporan, nema potrebe da ga skidate sa linije za mužu tokom pranja.



Vodoootporan



Dug životni vek



Wi-fi



Radi automatski



Погодан за контакт са храном



Bluetooth



Notifikacija za mobilne uređaje




Nije potrebno osoblje



MilkingCloud

Instaliranje u 3 koraka

1

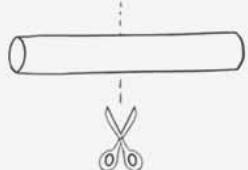


Prerežite crevo za mleko između muznog aparata i kante za melko /melkovoda.

2



Povežite crevo ponovo zajedno tako što ćete spojiti MastiPro između dele koji je presečen.

3

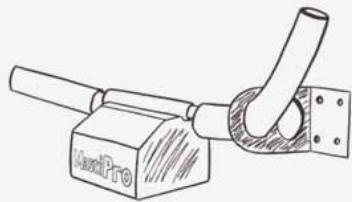


Ukoliko je potrebno, osigurajte uređaj tako što ćete pričvrstiti gvožđe u obliku slova L.

4




Skenirajte QR kod i preuzmite aplikaciju.

5

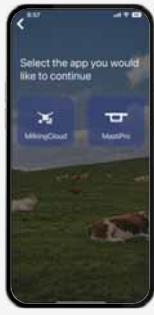

Izaberite opciju MastiPro u aplikaciji.

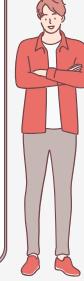

Čestitamo.
Sve je gotovo !



Pratite rezultate

MastiPro upozorava korisnika sa 3 različita svetlosna indikatora
To su: PLAVA: Normalna ŽUTA: SUMNIVO CRVENA: Mastitis

ŽUTI LED indikator znači da postoji sumnjivi slučaj mastitisa. Ako ta životinja ponovo dobije žuto upozorenje pri sledećoj muži, treba je pregledati. Kada se životinja pregleda, mastitis možda nije uvek prisutan. Povećanje jona u mleku može biti posledica neinfektivnog faktora.



Ako PLAVA lampica treperi,
vrednosti jona mleka su
normalne

Ako CRVENA lampica treperi, to
znači da je otkriven mastitis


3 koraka za prilagođavanje mobilnih obaveštenja

1



Uverite se da postoji pametni telefon ili tablet u opsegu pokrivenosti Bluetooth-om tokom muže

2

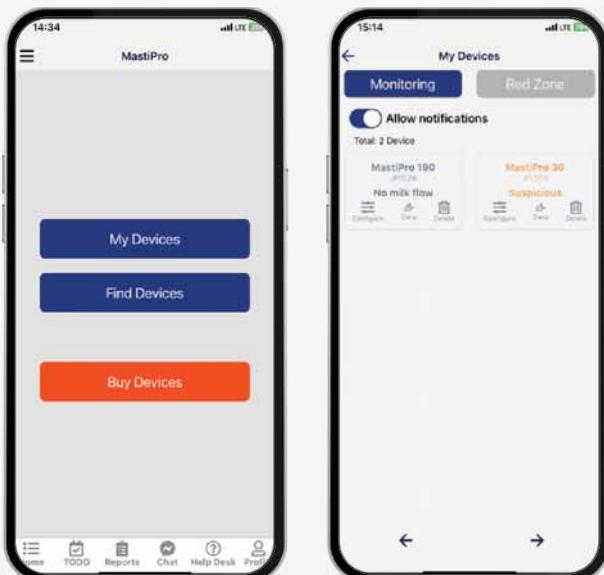

Ne zaboravite da svi korisnici koji žele da budu obavešteni moraju izabrati moje uređaje i dozvoliti obaveštenja.


3




Da biste primali obaveštenja, ne morate da se prijavite sa istim korisničkim nalogom na različitim pametnim telefonima.

Kako izgledaju rezultati u aplikaciji?

Takođe možete pristupiti uređajima u aplikaciji tokom muže. Vaši uređaji će biti navedeni u odeljku „Moji uređaji“.

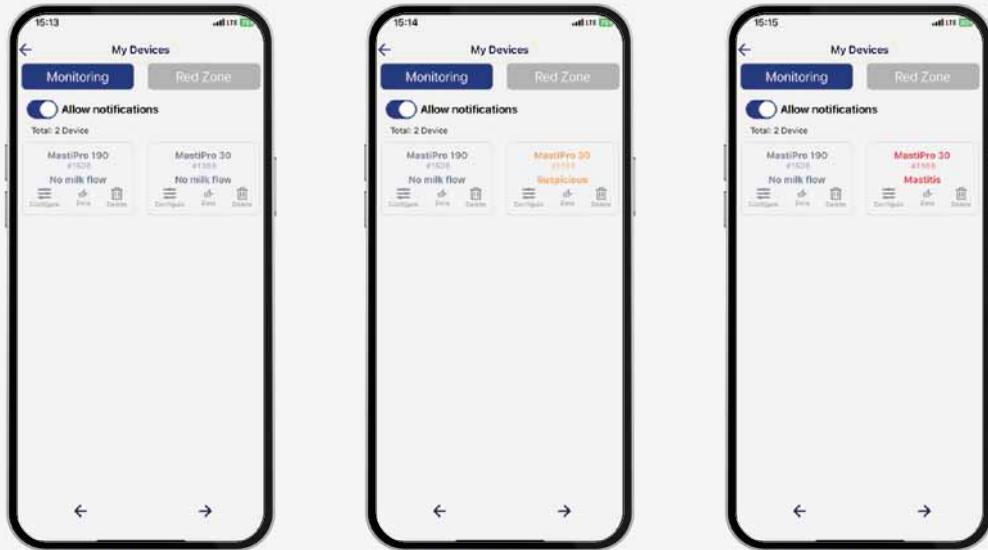

Upozorenja se istovremeno prikazuju u aplikaciji u skladu sa bojom koju LED lampice na uređaju pokazuju. Pored toga, ovaj ekran mora biti uključen i povezan na internet i blutut konekciju sa masti pro uređajem da bi drugi korisnici koji nisu u štali ili farmi dobijali obaveštenja

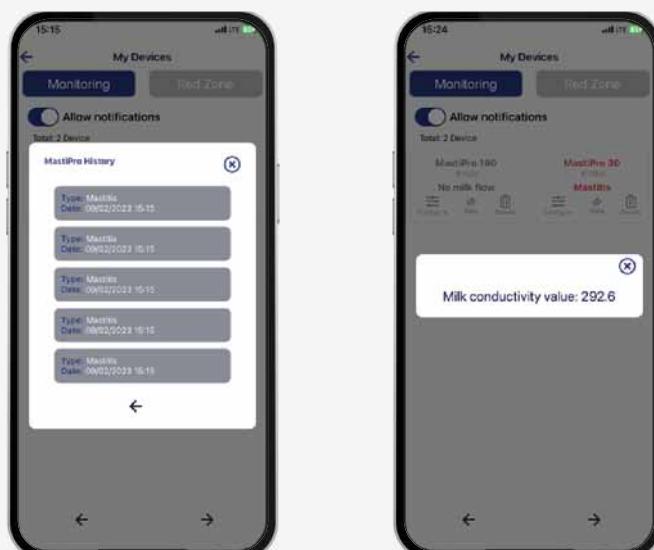

Klikom na jedan od povezanih uređaja u odeljku „Moji uređaji“ prikazuje se istorija obaveštenja izabranog Masti Pro-a . Ako želite da vidite vrednost provodljivosti tokom muže, kliknite na “podaci”.

Bitne činjenice



Mlečni vod MastiPro normalno se pere BEZ SKIDANJA, nakon muže. Pranje SE VRŠI preporučenim postupkom a primena kiselina i baza neće oštetiti senzore.



Spoljašnja strana kutije je vodootporna i pogodna za čišćenje. Za čišćenje MastiPro-a nije potreban dodatni napor. Jednom instaliran, nije potrebno održavanje.

Tehnička informacija

Jedinica za težinu	240 g (sa baterijom)	Kontrola merenja	mikrokontroler sa jednim čipom
Dimenzije	15,5 cm 6,0 cm 6,0 cm	Garancija	2 godine
Vrsta baterije	Litijumska baterija veličine C	Rezolucija merenja	1 jedinica
Ulagana snaga	3.6 V, 10 mA peak	Trajanje baterije	5 godina (zavisi od vremena Bluetooth veze)
Prečnik priključne tačke na vod za mleko	16 mm	Preporučena temperatura skladištenja	od 4 Celzijusa do 40 Celzijusa
Podešavanje nivoa alarma (osetljivosti).	može se izabrati vrednost između 1-10	Metod upozorenja	preko LED svetla (plavonormalno, žuto-sumnjivo, crveno-mastitis) i putem obaveštenja u aplikaciji.